


Injektionsstellen

- 1 Bauch**
Keine Injektion innerhalb der ersten 5 cm um den Bauchnabel herum
- 2 Rechter Oberschenkel**
Injektionsgebiet beginnt ca. 20 cm oberhalb des Knies und 5 cm unterhalb der Leistenbeuge
- 3 Linker Oberschenkel**
Injektionsgebiet beginnt ca. 20 cm oberhalb des Knies und 5 cm unterhalb der Leistenbeuge

- 4 Linke Hüfte**
Bereich der oberen Hüfte; immer unterhalb der Taille
- 5 Rechte Hüfte**
Bereich der oberen Hüfte; immer unterhalb der Taille

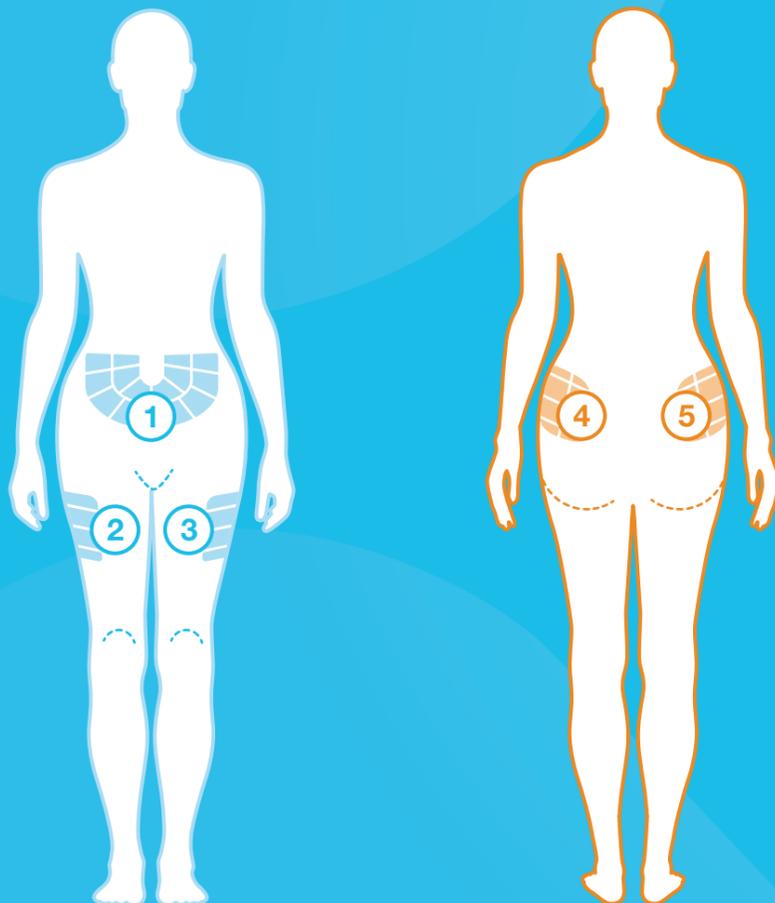

In jedem Bereich können Sie an mehreren Stellen injizieren. Notieren Sie sich, wann Sie an welcher Stelle injiziert haben. Am besten eignet sich ein Patiententagebuch.

SPRITZENGEHÄUSE

Beladungskontrolle per „Klick“

INJEKTORGEHÄUSE

Ergonomische Form und große, griffige Oberfläche für einen sicheren Halt während der Injektion

NADELSCHUTZ-KAPPENENTFERNER

Zum Entfernen der Nadel-schutzkappe bzw. Minimierung des Verletzungsrisikos

REGULATOR ZUR TIEFENEINSTELLUNG

Zur individuellen Einstellung der Einstichtiefe und zur Sicherung der Nadel

SCHLOSSYMBOL

Zur leichten Visualisierung der Öffnungs- und Schließungsposition

GROSSES SICHTFENSTER


Ermöglicht (zusätzlich zum akustischen Signal) das Verfolgen des Injektionsvorgangs und das Erkennen der vollständig durchgeführten Injektion

AUSLÖSEKNOPF


Seitliche Positionierung zur besseren Erreichbarkeit während der Injektion



Anleitung zur Injektion ohne Autoinjektor

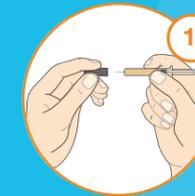

Die Nadelschutzkappe gerade von der Fertigspritze abziehen.

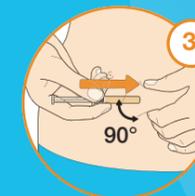

Eine lockere Hautfalte mit dem Daumen und Zeigefinger bilden.

Die Nadel in einem 90°-Winkel (senkrecht) in die Hautfalte stechen. Mit gleichmäßigen Druck auf den Spritzenkolben das Medikament vollständig injizieren.





Die Nadel für 15-20 Sekunden in der Haut belassen.

Die Nadel gerade und sanft aus der Haut ziehen. Die Injektion ist beendet.



Entfernung der Nadel

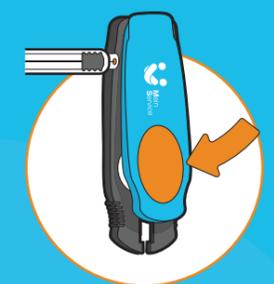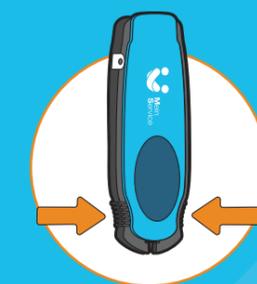


- Drücken Sie die schwarzen, geriffelten Seiten der Nadelclipper-Unterseite zusammen. Dieser ist nun geöffnet und einsatzbereit. Halten Sie zum Knipsen das Gerät weiterhin fest.
- Nehmen Sie mit der anderen Hand die benutzte Spritze am Glaskörper und führen Sie die Nadel vollständig in die seitliche Öffnung des Nadelclippers ein.
- Durch Zusammendrücken der Nadelclipper-Flügel schneiden Sie die Nadel ab.
- Die Nadel wird im Nadelclipper sicher eingeschlossen. Der Nadelclipper kann solange benutzt werden, bis das Reservoir für die Nadel voll ist und wird dann komplett entsorgt. Die Spritzen mit der entfernten Nadel können nun im Hausmüll entsorgt werden.
- Sollten Sie keinen Nadelclipper verwenden, entsorgen Sie die verwendete Spritze direkt in einen durchstichsicheren Behälter.

INJEKTIONS-ANLEITUNG MIT DEM MYJECT™

VORBEREITEN DES MYJECT™


1

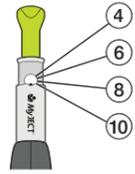

Stellen Sie die Injektionstiefe ein


- Nehmen Sie das Spritzengehäuse, welches mit „MyJECT™“ beschriftet ist.
- Wählen Sie die passende Injektionstiefe.
- Stellen Sie hierfür den weißen Regulator zur Tiefeneinstellung zwischen 4 (flachere Injektion) und 10 (tiefere Injektion) ein, bis die gewünschte Stufe einrastet.

2

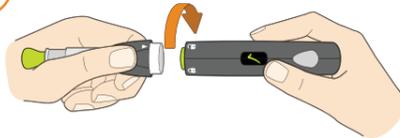

Öffnen Sie den Autoinjektor


3

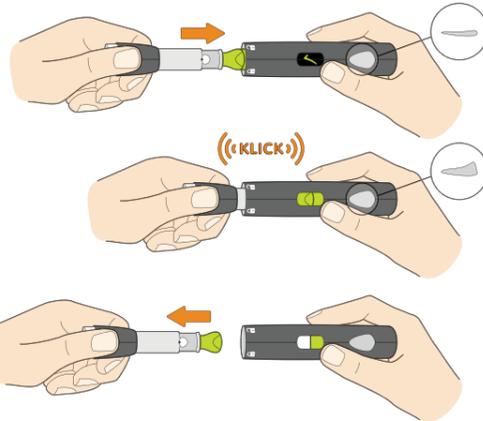

Aktivieren Sie den MyJECT™

- Drehen Sie das Spritzengehäuse um und drücken Sie mit der hellgrünen Hülse den gleichfarbigen Kolben des Injektorgehäuses ein.
- Ein deutliches Klicken signalisiert Ihnen, dass der Autoinjektor geladen ist.
- Prüfen Sie: Das Sichtfenster ist zur Hälfte hellgrün und der weiße Auslöseknopf ist heraus gesprungen.


4

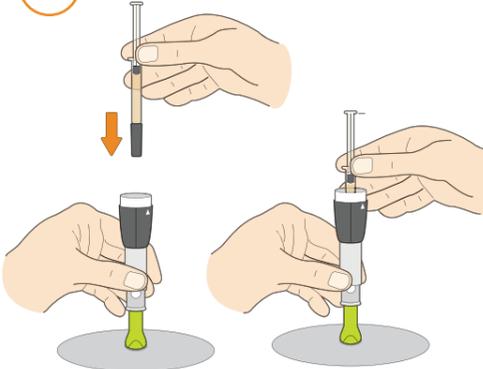

Das Einsetzen der Spritze

- Stellen Sie den hellgrünen Nadelschutzkappenentferner mit dem Spritzengehäuse auf eine gerade, saubere Oberfläche.
- Lassen Sie die Fertigspritze mitsamt der Nadelschutzkappe in das Spritzengehäuse gleiten.
- Schieben Sie die Spritze vollständig ein, bis der Glasrand der Spritze am Rand des Spritzengehäuses anliegt. Bitte nutzen Sie hierfür Ihre beiden Zeigefinger, die Sie am Glasrand der Spritze ansetzen.
- Ein Einrasten signalisiert, dass die Spritze korrekt eingesetzt wurde.


5

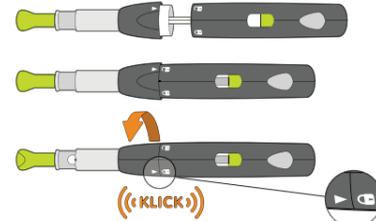

Setzen Sie den MyJECT™ wieder zusammen

- Stecken Sie das Spritzengehäuse mit dem Pfeil auf das offene Schloss des Injektorgehäuses zeigend auf selbiges. Sie hören ein Klicken, wenn der Autoinjektor eingerastet ist.

6

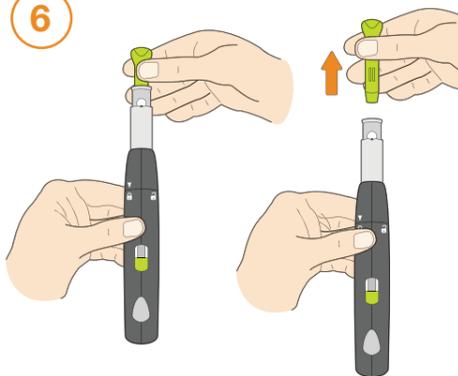

Ziehen Sie die Nadelschutzkappe ab

- Bitte halten Sie den Autoinjektor aufrecht, so dass der hellgrüne Nadelschutzkappenentferner nach oben zeigt.
- Ziehen Sie die hellgrüne Hülse gerade nach oben ab.


Tipp: Ein leichtes Schnipsen mit dem Finger gegen den Autoinjektor löst einen eventuell vorhandenen Unterdruck

Entsorgen der Nadelschutzkappe

- Drehen Sie den hellgrünen Nadelschutzkappenentferner um, so dass die Nadelschutzkappe vorn herausfällt. Der MyJECT™ ist nun bereit zur Injektion.

DURCHFÜHRUNG DER INJEKTION MIT DEM MYJECT™

7

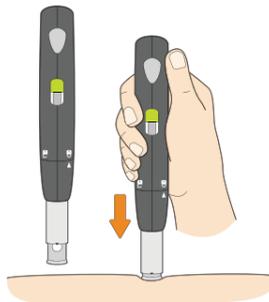

Setzen Sie den MyJECT™ zur Injektion auf die Haut

- Setzen Sie den MyJECT™ in einem 90°-Winkel (senkrecht) auf die Haut auf.
- Ein leichter Widerstand beim Herunterdrücken des Regulators zur Injektionstiefeneinstellung muss überwunden werden (Sicherheitssperre).

Tipp: Sollten Sie das zweite Klicken nicht gehört haben, sollten Sie mind. 15 Sekunden warten, ehe Sie den MyJECT™ von der Haut abheben.



Lösen Sie die Injektion aus

- Durch kurzes Drücken des weißen Auslöseknopfes startet die Injektion.
- Sie hören ein Klicken. Lassen Sie bitte während des Injektionsvorgangs den Autoinjektor unverändert aufgesetzt.
- Ein zweites Klicken signalisiert, dass die Injektion beendet ist.

8



Autoinjektor abheben


- Heben Sie den Autoinjektor wieder gerade von der Haut ab. Die Nadel ist bereits automatisch aus der Haut gezogen worden.
- Der Regulator zur Tiefeneinstellung verbirgt die Nadel.

Sichtfenster prüfen

- Wenn die Injektion vollständig verabreicht wurde, ist im Sichtfenster ein hellgrünes Häkchen zu sehen.

NACHBEREITUNG DER INJEKTION MIT DEM MYJECT™

9

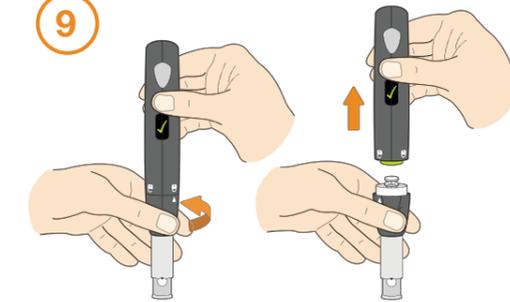


Öffnen Sie den Autoinjektor

Entnehmen Sie vorsichtig die benutzte Spritze aus dem MyJECT™.

Zur Entsorgung der Nadel siehe Vorderseite.

10

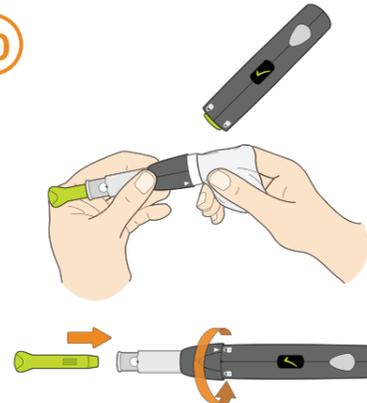

Reinigen Sie Ihren Autoinjektor mit einem leicht feuchten, sauberen Tuch.

Setzen Sie den MyJECT™ wieder zusammen und stecken Sie den hellgrünen Nadelschutzkappenentferner ein.

Ihr MyJECT™ kann nun bis zur nächsten Injektion aufbewahrt werden.